



T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

KİRLİ MALZEME TAŞIMA ARABASI TEMİZLEME VE DEZENFEKSİYON TALİMATI



DOKÜMAN NO: AY.TL.05

YAYIN TARİHİ: 07.05.2021

REVİZYON NO: 02

REVİZYON TARİHİ:19.02.2024

SAYFA NO: 1 / 1

1.AMAÇ: Kirli malzeme taşıma arabası ve boxlarının, temizlik ve dezenfeksiyonunun etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak.

2.KAPSAM: Merkezimizde bulunan kirli malzeme taşıma arabasını kapsar.

3.SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından destek personelleri, denetlenmesinden Sterilizasyon sorumlu hemşiresi, enfeksiyon kontrol hemşiresi

4.TANIMLAR ve KISALTMALAR

5.UYGULAMA

- Kirli malzeme taşıma arabası ve boxlar, her gün sonunda sonrasında temizlenecektir ve temizliği Merkezi Sterilizasyon birimi kirli alanda yapılacaktır.
- Taşıma arabası ve boxlar 900 cc su içine 100 cc çamaşır suyu ilave edilerek silinecektir.
- Kuruduktan sonra hızlı yüzey dezenfektanı sıkılacak ve 2 dakika bekletilecektir.

6.İLGİLİ DOKÜMANLAR

- KİRLİ MALZEME TAŞIMA ARABASI TEMİZLİK TAKİP FORMU