



T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
HEPATİTLİ HASTALAR İÇİN ÜNİT, ALET VE KLİNİK TEMİZLİĞİ



TALİMATI

DOKÜMAN KODU: EN.TL.07

YAYIN TARİHİ:14.10.2024

REVİZYON NO: 00

REVİZYON TARİHİ: 00

SAYFA NO: 1

1.AMAÇ

Hasta alınmadan önce Ünit temizliğinin etkin bir şekilde yapılması sağlanarak, enfeksiyon riskini önlemek.

2.KAPSAM

Merkezimiz kliniklerinde bulunan tüm ünitleri kapsar

3.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından ağız diş sağlığı teknikerleri, destek personelleri denetlenmesinden klinikte görevli sağlık personelleri, enfeksiyon kontrol hemşiresi ve müdür sorumludur.

4.TANIMLAR ve KISALTMALAR

Kreşuar: Ünit üzerinde bulunan, hastanın tükürdüğü bölüm

Dezenfeksiyon: Hastalık yapıcı mikroorganizmaların öldürülmesi

Sterilizasyon: Tüm mikroorganizmaların öldürülmesi

Tetiye: Ünit üzerinde hastanın başını koyduğu bölüm

Reflektör Kolu: Ünit ışığının kolu

5.UYGULAMA

5.1. HEPATİTLİ HASTALAR İÇİN ÜNİT ALET VE KLİNİK TEMİZLİĞİ (DEZENFEKSİYON VE STERİLİZASYON)

Ünit Temizliği ve Dezenfeksiyonu klinikte çalışan temizlik elemanı tarafından şu şekilde yapılmalıdır:

- Klinik temizlik elemanı tarafından kullanılan tüm el aletleri, aeratör, mikromotor ve cavitron başlığı gibi mekanik aletler bir poşete konulur ve sterilizasyon ünitesine teslim edilir.
- Kreşuar içi çamaşır suyu ile akıtılarak yıkanır.
- Kreşuar kenarları peçete ile hızlı yüzey dezenfektanı ile silinir.
- Reflektör kolu ve tüm ünit aksamaları hızlı yüzey dezenfektanı ile tek kullanımlık peçetelerle silinir.
- Uygun miktarda çamaşır suyuyla hazırlanmış solüsyonla ünitenin koltuk kısmı silinir.
- Hızlı yüzey dezenfektanı tüm bölmelere sıkılır ve 5 dakika beklenir, bu arada klinik penceresi açılarak havalandırma sağlanır.

5.2. STERİLİZASYON ÜNİTESİNDE İŞLEMLER (DEZENFEKSİYON VE STERİLİZASYON)

- Poşetli olarak bu üniteye teslim edilen aletler HEPATİTLİ hastalar için
- ayrılan dezenfeksiyon solüsyonu olan kaba konur. Belirlenen süre kadar bekletilerek
- otoklava konulur.
- Aeratör, cavitron başlığı veya mikromotor gibi aletlere yüzey dezenfektanı sıkılır,
- silinir poşetlenerek steril edilir.

6.İLGİLİ DOKÜMANLAR

DS.FR.03 ÜNİT TEMİZLİK KONTROL FORMU

DS.TL.15 ÜNİT TEMİZLİĞİ DEZENFEKSİYONU VE HASTA HAZIRLIĞI TALİMATI