
	<p style="text-align: center;">T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KİMYASAL İNDİKATÖR KULLANMA TALİMATI</p>			
DOKÜMAN KODU: DS.TL.03	YAYIN TARİHİ: 07.05.2021	REVİZYON NO: 01	REVİZYON TARİHİ: 15.10.2024	SAYFA NO: 1 / 1

1.AMAÇ

Merkezi Sterilizasyon Birimi cihazları için kullanılan kimyasal indikatörlerin bir standart çerçevesinde uygulanması ve yapılacak sterilizasyonun doğrulanması.

2.KAPSAM:

Otoklavda uygulanacak kimyasal indikatörlerin kullanımını kapsar.

3.SORUMLULAR

Merkezi Sterilizasyon Birimi çalışanları ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi.

4.TANIMLAR ve KISALTMALAR

5.UYGULAMA

- Kimyasal indikatör otoklavın her çevriminde, klinik aletleri paketlenmeden hemen önce sterilizasyon ünitesinde çalışan personel tarafından poşetlerin içine konulur.
- Test yapılırken otoklav normal sterilizasyon ayarında olmalıdır.
- Otoklavın sterilizasyon işlemi bittikten sonra sterilizasyon ünitesinde görevli personel tarafından parametreler kontrol edilir. Kimyasal indikatör referans renk değişimine uygun ise aletler ilgili kliniklere dağıtılır.
- Referans renk değişimi olmamış ise aletler için sterilizasyon sağlanamamış demektir. Bu durumda aletler kliniklere dağıtılmaz, tekrar yıkama ve sterilizasyon aşamasına geri dönlür. İşlem sonrası kimyasal indikatör testi tekrarlanır, sonuç olumlu ise aletler dağıtımına çıkarılır.
- Sorun devam ederse nedeni araştırılır, ilgili otoklav firması ile iletişime geçilerek bakım ve onarım istenir.
- Test sonuçları tarih ve saati yazılarak sterilizasyon takip formuna kaydedilir.

6.İLGİLİ DOKÜMANLAR

DS.FR.15 GÜNLÜK STERİLİZASYON İZLEM FORMU