
	<p style="text-align: center;"><b>T.C.</b> <b>ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ</b> <b>DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ</b> <b>AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ</b> <b>BOWIE-DICK TESTİ UYGULAMA TALİMATI</b></p>			
DOKÜMAN KODU: DS.TL.05	YAYIN TARİHİ: 07.05.2021	REVİZYON NO: 01	REVİZYON TARİHİ: 15.10.2024	SAYFA NO: 1 / 1

## 1.AMAÇ

Otoklav cihazının günlük kullanımının temel esasları içerisinde yer alan Bowie-Dick testinin uygulanarak, cihazın kullanımının hazır hale gelmesini amaçlar.

## 2.KAPSAM

Merkezi sterilizasyon birimini kapsar.

## 3.SORUMLULAR

Merkezi Sterilizasyon Birimi çalışanları.

## 4.TANIMLAR ve KISALTMALAR

### 4.1.UYGULAMA

- Test Sterilizasyon işlemleri başlamadan önce her sabah otoklav boşken Bowie-Dick test ayarına getirilir ve her gün uygulanır.
- Test her bir otoklav için ayrı ayrı yapılır.
- Testi, cihazları kullanan sterilizasyonda görevli personel yapar.
- Bowie-Dick test işlemi bitince otoklavdan çıkartılır.
- Bowie-Dick test üzerindeki renk değişimi gözlenir.
- Beklenen Renk değişimi tam oluşmamışsa sorun tespit edilerek çözümlenir ve otoklav için yeniden Bowie-Dick testi uygulanır.
- Test sonuçları günlük sterilizasyon izlem formuna tarih ve saati ile kaydedilir.

## 5.İLGİLİ DOKÜMANLAR

DS.FR.15 GÜNLÜK STERİLİZASYON İZLEM FORMU