



**T.C.**  
**ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ**  
**DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ**  
**AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ**  
**YIKAMA-DEZENFEKTÖR MAKİNALARI KULLANIM TALİMATI**



DOKÜMAN KODU: DS.TL.07

YAYIN TARİHİ: 07.05.2021

REVİZYON NO: 01

REVİZYON TARİHİ:15.10.2024

SAYFA NO: 1 / 2

## 1.AMAÇ

Merkezimiz sterilizasyon işlemleri için kullanılan yıkama-dezenfektör cihazının doğru ve verimli şekilde kullanımı, bakım ve temizliğini yapmaktır.

## 2.KAPSAM

Merkezi Sterilizasyon birimini kapsar.

## 3.SORUMLULAR

Merkezi Sterilizasyon Birimi Sorumlusu, Sterilizasyonda görevli personeller.

## 4.TANIMLAR ve KISALTMALAR

**Temizlik:** Alkale deterjan ile korozyonu önlemek için 40-55 C° de gerçekleşir, takiben asidik solüsyonla nötralizasyon gerçekleşir.

**Ön yıkama:** Kan ve organik atıklar gibi kaba kirleri uzaklaştırma basamağı olup, soğuk su ile gerçekleştirilir.

**Durulama:** Ön yıkama ve temizlikte kullanılan kimyasallar durulanır.



**Termal dezenfeksiyon:** 90 C° de 1 dk. sürer.

**Kurutma:** Tüm bu işlemler sonrası cerrahi aletlerin tam anlamı ile kurumasını sağlar.

## 5.UYGULAMA

### 5.1. Yıkama-Dezenfektör Cihazının Kullanımı

- Termal dezenfektör cihazları kapalı ortamda cerrahi aletlerin temizlik ve termal dezenfeksiyonunu aşağıdaki basamakları izleyerek gerçekleştirir. Aletlerin yerleştirilmesinden, işlemin tamamlanmasına kadar geçen süre 70 ila 120 dk.'dır.
- Elektrik güç kaynağı açılarak dijital ekranda görünen kullanım butonuna basılır ve şifre girilir.
- DEKONTAMİNASYON alanındaki kapı açılır. Solüsyonlar ve solüsyon hortum uçları kontrol edilir. Solüsyonlar dolu, hortum uçları açık olmalıdır.
- Kabin içindeki ızgaralar yabancı madde ve tıkanıklık açısından kontrol edilir.
- Sprey kolları tıkanıklık açısından kontrol edilir ve tıkanıklık var ise basınçlı su ve hava tutularak temizlenir. Yıkama kolları elle döndürülerek kontrol edilir.
- Aletler birbirine zarar vermeyecek şekilde yıkama makinesine yerleştirilmelidir.
- Üzerinde çok fazla organik bulaş olan aletler makineye yerleştirilmeden önce enzimatik çözücü ile manuel olarak temizlenmelidir.
- Çok parçalı aletler demonte edilerek yıkanmalı, yıkama sonrası parçalar birleştirilerek kontrol edilmelidir.
- Eklemler açık olarak yıkama tepsilerine yerleştirilmelidir.
- Tepsiye çok fazla alet yüklenmemeli, büyük parçalar küçükleri örtecek şekilde yerleştirilmemelidir.
- Aletler yıkandıktan sonra çok iyi durulanmalıdır. İyi durulanmayan aletler üzerinde leke veya renk değişimleri olabilir. Ayrıca deterjan kalıntıları hastaya zarar verebilir.
- Özellikle lümenli aletlerin lümeninden su geçirilmelidir.
- Durulama sıcaklığı 70-90° C arasında olmalı, ancak alet üzerinde aşınma varsa sıcaklık 70-75°C arasında tutulmalıdır.
- Malzemenin yapısına ve hassasiyetine göre program seçilmelidir.

	<p style="text-align: center;"><b>T.C.</b> <b>ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ</b> <b>DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ</b> <b>AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ</b> <b>YIKAMA-DEZENFEKTÖR MAKİNALARI KULLANIM TALİMATI</b></p>			
DOKÜMAN KODU: DS.TL.07	YAYIN TARİHİ: 07.05.2021	REVİZYON NO: 01	REVİZYON TARİHİ:15.10.2024	SAYFA NO: 2 / 2

- Dijital ekrandan uygun program seçilir ve butona basılır. Cihaz 5 sn. sonra çalışır.
- Program biter bitmez aletler makineden çıkartılmalı ve kurulamanın yeterli olmasına dikkat edilmelidir.
- Cihaz arıza durumunda sinyal verir ve dijital ekrandan arza koduna bakılarak yetkili firmayla temasa geçilir.

## 5.2. Yıkama-Dezenfektör Cihazının Temizliği

- Kabin içindeki ızgara çıkarılarak, su pervanelerinin delikleri kontrol edilir. Gerekirse temizlenir.
- Kapak içi, çevresi ve dış yüzeyler dezenfektanla temizlenir.
- Deterjan ve solüsyon çekmeceleri bol su ile temizlenir ve kurulanır.
- Biten veya azalan deterjan/solüsyonlar tamamlanır ve solüsyon değişim tarihleri kaydedilir.
- Yıkama-dezenfektörler için kullanılan arabalar dezenfektanlı bez ile silinir.
- Cihazın temizliği üretici firmanın önerileri doğrultusunda yapılır.
- Haftada bir cilalanıp her gün işlemler bittikten sonra temizliği yapılır.
- Yıkama makinesi çalıştırılmadan önce kullanılan dezenfektan nötrölizan solüsyonları seviyeleri kontrol edilir.

## 6.İLGİLİ DOKÜMANLAR

DS.FR.07 DEZENFEKTÖR YIKAMA TAKİP FORMU