



T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
OTOKLAV VAKUM TESTİ TALİMATI



DOKÜMAN KODU: DS.TL.08

YAYIN TARİHİ: 07.05.2021

REVİZYON NO: 01

REVİZYON TARİHİ: 15.10.2024

SAYFA NO: 1 / 1

1.AMAÇ

Merkezi Sterilizasyon Birimi otoklav cihazının güvenli çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi ve yapılacak sterilizasyonun doğrulanması amaçlanır. Otoklav günlük işleyişinde temel ölçüt olması sebebiyle cihazın günlük kullanıma hazır hala gelmesinin ve cihaz sızdırmazlığının test edilmesinin sağlanmasıdır.

2.KAPSAM

Merkezi Sterilizasyon Birimini kapsar.

3.SORUMLULAR

Merkezi Sterilizasyon Birimi çalışanları ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi.

4.TANIMLAR ve KISALTMALAR

5.UYGULAMA

- Her bir otoklav için ayrı ayrı test yapılır.
- Testler her pazartesi sabah cihaz çalıştırılmadan önce otoklav boşken sterilizasyon biriminde görevli personel tarafından yapılır.
- On/off tuşuna basılarak ve cihaz üzerinde yer alan anahtar çevrilerek cihaz çalıştırılır.
- Cihazın şifresi girilerek menü açılır.
- Menüden vakum/kaçak testi seçeneği seçilerek sistem hazır yazısı beklenir.
- Sistem hazır olduğunda test başlatılır.
- İşlem süresi yaklaşık 30 dk.'dır.
- Çıkan veri otoklav çıktısı şeklinde muhafaza edilir ve günlük sterilizasyon izlem formuna kaydedilir.
- Vakum kaçağı 1,3 milibar/dakikanın üzerinde ise cihazın çalışması durdurulur ve cihaz bakım onarım kapsamında değerlendirilir.
- Vakum testini geçen otoklav günlük kullanım için hazırlanır.

5.1. Vakum kaçak testi standartları

- Vakum kaçağı 1 milibar/dakikadan az ise haftada bir kez,
- 1 milibar/dakikadan fazla ise her gün,
- 1,3 milibar/dakika üzerinde ise cihazın çalışması durdurulmalıdır.

6.İLGİLİ DOKÜMANLAR

DS.FR.15 GÜNLÜK STERİLİZASYON İZLEM FORMU

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Birim Sorumlusu	Kalite Direktörü	Başhekim