



T.C
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
ULTRASONİK CİHAZI KULLANIM TALİMATI



DOKÜMAN KODU: DS.TL.10

YAYIN TARİHİ: 07.05.2021

REVİZYON NO: 01

REVİZYON TARİHİ:15.10.2024

SAYFA NO: 1 / 1

1.AMAÇ

Aletler ve materyaller üzerinde bulunan organik atıkların ultrasonik cihaz yardımıyla uzaklaştırılmasını sağlamak.

2.KAPSAM

Merkezimiz sterilizasyon birimini kapsar.

3.SORUMLULAR

Merkezi Sterilizasyon Birimi çalışanları.

4.TANIMLAR ve KISALTMALAR

5.UYGULAMA

- Cihaz, iç tarafında bulunan çizgiye kadar su (tercihen distile su) ve üretici firmanın önerdiği oranda dezenfektan madde doldurulur.
- Cihazın Açma/ Kapatma düğmesine basılır ve ön kısmında bulunan sıcaklık, güç ve zaman ayarı ayarlanır.
- Cihazın sıcaklığı kullanılan solüsyonun özelliğine göre değişebilir.
- Yıkacak materyaller cihaz içerisinde bulunan sepetlere suyun üzerine çıkmayacak şekilde yerleştirilir.
- Yıkama işlemi bittikten sonra materyaller su ile durulanır.

6.İLGİLİ DOKÜMANLAR

DS.FR.06 ULTRASONİK SOLÜSYON DEĞİŞİM KONTROL FORMU