
	<p style="text-align: center;">T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STERİLİZASYON BİRİMİ CİHAZLARININ BAKIM TALİMATI</p>			
DOKÜMAN KODU: DS.TL.013	YAYIN TARİHİ: 07.05.2021	REVİZYON NO: 01	REVİZYON TARİHİ: 15.10.2024	SAYFA NO: 1 / 1

1. GÜNLÜK YAPILACAK KONTROLLER

- Otoklav cihazının su vanaları kontrol edilmeli (akşamları kapatılmalı).
- Otoklav cihazının elektrik panosu kontrol edilmeli (akşamları kapatılmalı).
- Otoklav cihazının günlük temizliği yapılmalı.
- Alet yıkama makinasında su kaçağı kontrolü yapılmalı.
- Alet paketlenme makinasının ısı ayarları kontrol edilmeli.

2. AYLIK VE YILLIK YAPILACAK KONTROLLER

- Otoklav cihazının ayarları kontrol edilmeli.
- Otoklav cihazının mekanik aksanının temizliği kontrol edilmeli.
- Alet yıkama makinasında su kaçağı kontrolü yapılmalı.
- Alet yıkama makinasında dozaj pompaları kontrol edilmeli.
- Alet paketlenme makinasının ısı ayarları kontrol edilmeli.
- Alet paketlenme makinasının bant aksamı kontrol edilmeli.