



T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
ÜNİT TEMİZLİĞİ, DEZENFEKSİYONU VE HASTA HAZIRLAMA
TALİMATI



DOKÜMAN KODU: DS.TL.15

YAYIN TARİHİ: 07.05.2021

REVİZYON NO: 01

REVİZYON TARİHİ:15.10.2024

SAYFA: 1/2

1.AMAÇ

Hasta alınmadan önce Ünit temizliğinin etkin bir şekilde yapılması sağlanarak, çapraz enfeksiyon riskini önlemek.

2.KAPSAM:Merkezimiz kliniklerinde bulunan tüm ünitleri kapsar.

3.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından ağız diş sağlığı teknikerleri, destek personelleri denetlenmesinden klinikte görevli sağlık personelleri, enfeksiyon kontrol hemşiresi ve müdür sorumludur.

4.TANIMLAR ve KISALTMALAR

Kreşuar: Ünit üzerinde bulunan, hastanın tükürdüğü bölüm

Dezenfeksiyon: Hastalık yapıcı mikroorganizmaların öldürülmesi

Sterilizasyon: Tüm mikroorganizmaların öldürülmesi

Tetiye: Ünit üzerinde hastanın başını koyduğu bölüm

Reflektör Kolu: Ünit ışığının kolu

5.UYGULAMA

5.1. Hasta Ünite Oturmadan Önce

Paketlenerek steril olmuş alet, araç ve gereçler, gazlı bezler hazır bulunacaktır. Steril aletlerin yanına, kirli atıkların konulacağı plastik bardak hazırlanacaktır.

5.2. Hastanın Hazırlanması

- Hastaya tek kullanımlık bardak verilecektir.
- Hastaya tek kullanımlık hasta önlüğü takılacaktır.
- Hastaya peçete verilecektir.
- Tedavide tek kullanımlık tükrük emici kullanılacaktır.
- Tek kullanımlık örtü, yoksa tetiye başlığına bone kullanılır.
- Yapılan tüm temizliklerin kontrolleri yapıldıktan sonra kontrol listelerine kaydedilir.

5.3. Hasta Tedavisinden Sonra

- Hasta tedavisinde kullanılan eldiven, maske, bone gözlük çıkarılacaktır.
- Kan-kan ürünleri ile bulaş olmuş; önlük, bardak, eldiven, maske, bone, doktor önlüğü, diş, sakşın ucu, pansuman malzemesi vb. tıbbi atık kutusuna atılır. Enjektör iğnesi, iğne içeren diğer kesiciler, bisturi, kırılmış ampul vb. ayrı bir kesici delici alet kutusuna atılır.
- Enfekte olmayan her türlü atıklar; sterilizasyon poşetleri, ölçü ve protez poşeti, alçı modeller, protez ölçü madde atığı, peçete, büro atığı, önlük, eldiven, bone, maske, plastik bardak, yiyecek atıkları vb. evsel atık kutusuna atılır.
- Kirli aletler, kirli kutusuna bırakılacaktır. Kutuların kapakları kapalı tutulmalıdır.
- Yüzeyler (ünite tablası, hortumlar, tetiye, reflektör kolu gibi.) hızlı yüzey dezenfektanı sıkılmış gazlı bez ile temizden kirliye doğru silinecektir.
- Mikromotor başlıkları, cavitron başlıkları, aeratörler her kullanım sonrasında sterilizasyona gönderilir.
- Gözlükler, hızlı yüzey dezenfektanı sıkılmış gazlı bezle temizden kirliye doğru silinecektir.

- Ünit başlıkları steril edilmek üzere teslim formu ile ilgili sterilizasyon bölümüne gönderilir.
- Kreşuar yıkanıp kirlerinden arındırıldıktan sonra 900 cc suya 100 cc oranında çamaşır suyu dökülecek ve yüzey dezenfektanı sıkılarak dezenfekte edilir.

6.İLGİLİ DOKÜMANLAR

DS.FR.01 KLİNİKLER AYLIK TEMİZLİK-DEZENFEKSİYON VE DENETİM FORMU

DS.FR.03 ÜNİT TEMİZLİK KONTROL FORMU